

Messdaten der Hornhaut vom OCULUS Keratograph importieren | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt



Voraussetzung

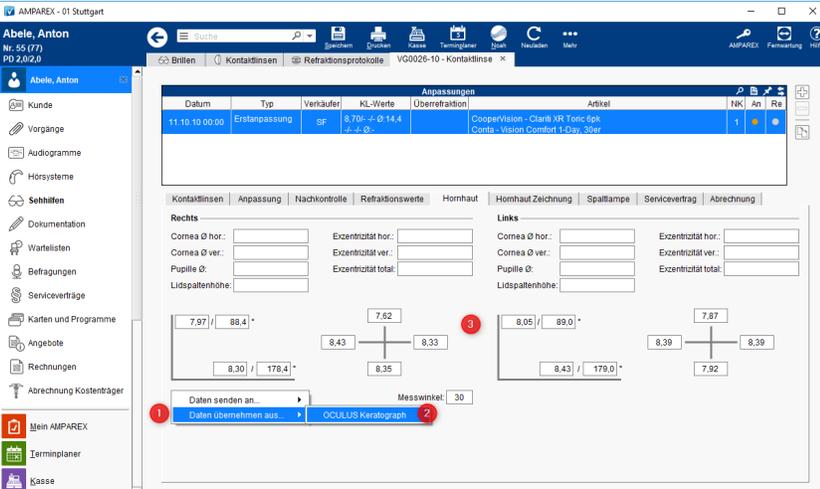
Es muss eine OCULUS Schnittstelle in AMPAREX eingerichtet sein.

Messung am Kunden durchführen und die Messdaten vom OCULUS Keratograph importieren:



Hinweis

Das OCULUS Programm muss geschlossen sein.

	Beschreibung
	<p>(a) Öffnen Sie beim Kunden (1) in den Sehhilfen (2) den/einen Kontaktlinsenvorgang (3) und wechseln dort in den Reiter 'Hornhaut' (4).</p> <p>(b) Unten links erreichen Sie über den Optionen-Button (5) die Auswahl 'Daten senden an 'OCULUS Keratograph' (6).</p> <p>(c) Es öffnet sich das OCULUS Programm und man sieht die Kunden-ID aus AMPAREX.</p> <p>(d) Jetzt kann die Messung am Kunden durchgeführt werden. Beide Seiten der Messung müssen geöffnet werden.</p> <div data-bbox="1003 934 1412 1092" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p> Wichtig</p><p>Hierbei ist es wichtig, dass immer zuerst das rechte Auge geöffnet wird.</p></div> <p>(e) Nach erfolgreicher Messung schließen Sie das OCULUS Programm.</p> <p>(f) In AMPAREX öffnet man jetzt im Kontaktlinsenauftrag wieder die Optionen (1) und wählt hier 'Daten übernehmen aus OCULUS Keratograph' (2) aus.</p> <p>(g) Die Messdaten werden jetzt in den darüber liegenden Feldern (3) eingetragen und angezeigt</p>

Siehe auch ...

- [OCULUS Keratograph | Optik Schnittstelle](#)